

Breeze

by ACCESS™



Forward
Thinking
Mobility

www.Breeze-walker.com

USER MANUAL

1. Inhoud	6. Vervoer en Montage
2. Inleiding	7. Persoonlijke Veiligheid
3. Beschrijving van de Onderdelen	8. Bediening
4. Behandeling en Onderhoud	9. Specificaties
5. Aanpassingen voor meer Comfort	10. Sonderzubehör

Gefeliciteerd met uw nieuwe Breeze rollator. De Breeze rollator is een evolutionair ontwerp van Access Vital uit Hamar, Noorwegen. De Breeze is zeer licht en heeft een gestroomlijnd, modern en elegant ontwerp. De rollator is ontworpen om de gebruiker te helpen bij allerlei alledaagse handelingen zoals lopen en boodschappen doen.

Wij bij Access zijn van mening dat iedereen van de buitenlucht moeten kunnen genieten en zich zowel thuis als buitenshuis met meer vrijheid moet kunnen bewegen dankzij een verhoogde mobiliteit. Onze producten hebben niet alleen bijzondere functionaliteiten, maar ook een moderne look, waardoor ze niet 'gestigmatiseerd' worden als hulpmiddel voor mobiliteit.

De Breeze is geschikt voor alledaags gebruik voor zowel binnen als buiten. De rollator is eenvoudig te verstellen, heeft drie verschillende zithoogtes en is gemakkelijk mee te dragen.

Alle Breeze rollators zijn vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsstandaards en dragen het CE-keurmerk voor Medische Hulpmiddelen. De Breeze rollator is een robuust en aantrekkelijk product naar Scandinavisch ontwerp, dat bovendien een zeer kosteneffectieve en betrouwbare metgezel is die helpt bij speciale mobiliteitsbehoeften.

3.

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN



4.

BEHANDELING EN ONDERHOUD

- De rollator dient alleen gebruikt te worden als hulpmiddel voor meer mobiliteit.
- Zorg ervoor dat de rollator schoon wordt gehouden. De rollator kan afgenomen worden met een doek of een spons met een mild reinigingsmiddel of kan gereinigd worden met een hogedrukspuit of tuinsproeier.
- Controleer regelmatig de bewegende delen (bijv. wielen en hoogteverstellers)
- Controleer dat de met hendels bedienbare kabelremmen goed afgesteld zijn (zie ook het deel BEDIENING).
- Alle bevestigingsmiddelen (schroeven, moeren en bouten) dienen regelmatig gecontroleerd te worden om er verzekerd van te zijn dat ze goed vast zitten.
- Laat onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan uw Breeze rollator uitsluitend door bevoegde dealers uitvoeren

5.

AANPASSINGEN VOOR MEER COMFORT



Aanpassen van de handvathoogte

Trek, om de handvaten van de rollator in hoogte te verstellen, de Handvathoogteversteller uit en regel tegelijkertijd de hoogte van het handvat. Laat, wanneer de juiste hoogte is bereikt, de versteller los en duw het handvat naar beneden totdat u er zeker van bent dat dit vergrendeld is.

Doe hetzelfde met het andere handvat.



Aanpassen van de zittinghoogte

Duw, om de hoogte van de zitting aan te passen, beide Zittingvergrendelingshendels naar binnen en duw de zitting naar voren uit de gleuven. Plaats de zitting op de gewenste hoogte en trek de zitting aan totdat de Zittingvergrendelingshendels weer vergrendeld op hun plaats vallen.

6.

MONTAGE EN VERVOER



- De Breeze rollator wordt volledig gemonteerd en klaar voor gebruik geleverd. U hebt geen gereedschap nodig om de rollator in gebruik te nemen.
- Trek, om de Breeze in te klappen om deze te vervoeren of op te bergen, de inklaphendel aan terwijl u de Breeze vasthoudt bij de zittinghendel. De Breeze zal in de vergrendelde ingeklapte positie vallen, zoals u op de linker foto kunt zien.
- Trek, om de Breeze uit te klappen voor gebruik, aan de inklaphendel totdat de achterpoten vrij roteren. Duw de handvaten naar beneden om de Breeze open te duwen en deze te gebruiken.
- Wees voorzichtig wanneer u de rollator in de kofferbak van een auto plaatst of u deze uit de kofferbak tilt.

- Zorg er voor uw eigen gezondheid en comfort voor dat u de rollator in een goede houding gebruikt en dat u de rollator zo vasthoudt dat u de remmen met gemak kunt bedienen.
- Bewaar de rollator op een veilige plaats.
- Klap de rollator voor gebruik volledig uit in de vergrendelde positie.
- Kans op klemmen – plaats geen vingers of handen in de scharnieren van de Breeze rollator wanneer u deze dicht of open klapt.
- Controleer voordat u de rollator gebruikt of de wielen stabiel zijn en ze de grond raken.
- Zorg ervoor dat de remmen juist afgesteld zijn en dat ze getest zijn voordat de rollator in gebruik wordt genomen.
- Controleer dat de zitting vergrendeld is in de juiste positie voordat u erop gaat zitten.
- Ga altijd in het midden van de zitting zitten en zorg ervoor dat de zitting zo afgesteld is dat de voeten van de gebruiker de grond raken.
- Vergrendel altijd de parkeerremmen voordat u gaat zitten.
- Ga nooit op de rollator zitten wanneer deze dichtgeklapt staat.
- Ga nooit op de rollator staan en gebruik deze niet als trapje.
- Vervoer nooit een persoon op de zitting van de rollator.
- Wees voorzichtig wanneer u de rollator optilt of draagt.



Mand

De handige winkelmand hangt aan de voorkant van de zitting van de Breeze rollator. De mand kan maximaal 10 kg dragen.

Obstakels.

De rollator is uitgerust met grote voorwielen en een voetpedaal waarmee grote obstakels (zoals een stoeprand) genomen kunnen worden. Duw met uw voet op het voetpedaal en trek tegelijkertijd aan de handvaten om de voorwielen op te tillen om over het obstakel te geraken.




Remmen.

De remmen zijn special ontworpen en zijn een essentiële functie van uw Breeze rollator. Er zijn geen loshangende remkabels en het gepatenteerde systeem is veiliger en benodigt minder onderhoud dan andere oplossingen. Trek, om te remmen, eenvoudigweg de remhendel omhoog naar het handvat toe. Hiervoor is slechts een kleine trekbeweging nodig. De remmen kunnen eenvoudig afgesteld worden op een andere weerstand.

Om de remmen te vergrendelen (en de parkeerremmen te activeren) duwt u simpelweg de remhendel naar beneden totdat deze vergrendelt.


Om de remmen te ontgrendelen trekt u de remhendel op. Deze klikt dan terug in zijn normale positie.

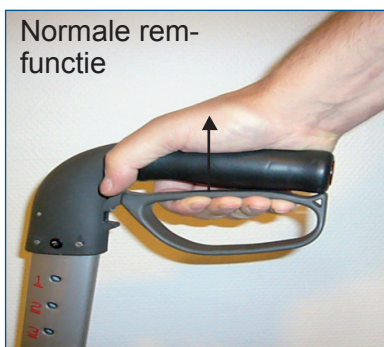

Onderhoud van de remmen.

Voordat u de Breeze rollator gebruikt, dient gecontroleerd te worden of de remmen goed afgesteld zijn. Er dient regelmatig onderhoud gepleegd te worden aan de remfuncties om ze in optimale staat van werking te houden, omdat de onderdelen van remmen en banden onderhevig zijn aan normale slijtage.

In het achterpootprofiel zit net boven het linkerwiel een handige verstelschroef (zeskantbout) (zie de foto aan de rechterkant). Stel de schroef zo af dat de remarm ongeveer 3 mm van het wiel af zit. Wanneer u de schroef indraait (rechtsom) dan vergroot u de afstand tot de band, wanneer u de schroef uitdraait (linksom) dan verkleint u de afstand.

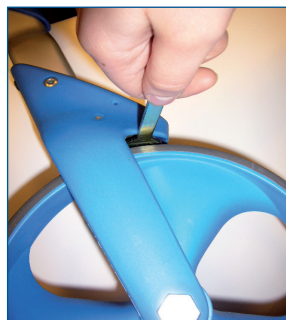

9.

TECHNISCHE GEGEVENS

Type:	Breeze
De hoogte van het handvat:	77-95cm
Hoogte zitting	48-62cm
Max. gewicht gebruiker:	125 kg
Afmetingen in cm (bxlxh) :	60 x 72cm
Afmetingen als ingeklapt :	60 x 27 x 96
Gewicht:	<7 kg
Materiaal :	Aluminium en met vezelfilter verstevigd plastic
Reiniging :	Reinigingsmiddel of hogedruksproeier

10.

SONDERZUBEHÖR

Ihr Breeze-Rollator lässt sich ganz nach Ihren Bedürfnissen mit weiterem Zubehör ausrüsten. Wenden Sie sich an den Händler und erfragen Sie dort Preise und Vorrätigkeit:



•Rückenlehne – gepolsterte für komfort



•Krücken-/Stockhalter – zur Mitnahme von Krücken oder Gehstöcken



•Serviertablett – geschirrspülergeeignet, für Getränke und Mahlzeiten (bis 3 kg)



•Deluxe Case LogicTasche – für Ihre persönlichen Dinge