

Breeze

by ACCESS™



Forward
Thinking
Mobility

www.Breeze-walker.com

USER MANUAL

1 Sisältö	6 Kävelytelineen avaaminen ja taittaminen
2 Esittely	7 Käyttöturvallisuus
3 Osien kuvaus	8 Käyttäminen
4 Hoito ja huolto	9 Tekninen erittely
5 Säättäminen	10 Lisävarusteet

Onnittelut uuden Breeze kävelytelineen hankinnasta. Breeze kävelyteline on edistyksellisen Access Vital yhtiön (Hamar Norja) design-tuote. Breeze on kevyt ja sulavalinjainen, modernia tyylikästä muotoilua. Kävelytelineen tarkoitus on tarjota käyttäjälleen turvallinen kävelyn tuki päivän kaikkiin askareisiin ja asiointiin.

Access yhtiön johtava ajatus on, että jokaisen kansalaisen tulee saada nauttia vapaasta liikkumisesta kotona ja ulkona niin luonnossa kuin liikekeskuksissa ja virastoissa. Tuotteemme ovat erittäin toiminnallisia, näyttävät modernin houkuttelevilta eivätkä leimaa käyttäjänsä.

Breeze sopii jokapäiväiseen käyttöön niin sisällä kuin ulkona. Se tarjoaa helppoa säädettävyyttä, 3 eri istuinkorkeutta, sekä vaivatonta kannettavuutta/kuljetettavuutta.

Breeze kävelyteline valmistetaan noudattaen laatustandardeja, ne ovat CE-merkittyjä ja niiden käyttöturvallisuutta testataan lääkinnällisten laitteiden mukaisesti. Breeze kävelytelineen suunnittelussa on lähtökohtana pohjoismaiset tottumukset, tyylijätkä, käyttöolosuhteet ja toiminnallisuusvaatimukset. Breeze on kestävä rakenteeltaan ja se on tuotettu kustannus-tehokkaasti. Breeze on pitkäjänteinen turvallinen valinta erilaisiin liikkumisen tarpeisiin.



NELJÄ

HOITO JA HUOLTO

Kävelytelinettä saa käyttää vain kävelyn tukemiseen.

Pidä kävelyteline puhtaana kaikesta liasta, jotta se pysyy toimintakuntoisena. Kävelyteline voidaan pyyhkiä neutraalilla pesuaineella siivouspyyhkeellä tai harjalla, jonka jälkeen huuhdellaan ja kuivataan. Likainen kävelyteline voidaan puhdistaa myös painepesurilla tai vesisuihkulla.

Tarkista säännöllisesti kaikki säädettävät tai liikkuvat osat (esim pyörät ja kork.säädöt).

Tarkista, että jarrukahvan käyttämä vaijerijarru on säädetty oikein (kohta KÄYTTÄMINEN).

Tarkista säännöllisesti kaikkien ruuvien, muttereiden ja pulttien kireys.

Mikäli Breeze kävelytelinettä täytyy huoltaa tai korjata, käänny valtuutetun maahantuojan Respecta Oy:n teknisen palvelun puoleen puh 0207 649 747. Korjauksissa ja huolloissa saa käyttää vain Breezen alkuperäisiä varaosia.



Käsituksen korkeuden säätäminen

Vapauta peukalolla rungosta pois päin painaen rungon sisäsivulla olevaa punaista vapautinjousta ja säädä toisella kädellä haluttu korkeus käsituelle. Lukitse valittu korkeus vapauttamalla ote lukitusjousesta ja painamalla käsi kahvaa alaspäin, kunnes kuuluu klik-ääni. Toista sama toiselle puolelle, alumiiniputken sisäsivulla olevasta numeroinnista voi tarkistaa, että molemmat puolet ovat samalla korkeudella.



Istuimen korkeuden säätäminen

Mikäli haluat muuttaa istuinkorkeutta, istuinlevy on ensin irrotettava rungosta. Paina yhtä aikaa istuimen ulkoreunoilla olevia klipsilukkoja ja työnnä istuinta eteenpäin. Istuin liukuu rungon hahlossa ja sen voi irrottaa kävelytelineen etupuolelta. Aseta istuin halutun korkeuden mukaiseen toiseen runkohahloon ja vedä istuinta kahvasta taaksepäin, kunnes klipsilukot lukkiutuvat.



- Breeze kävelyteline toimitetaan aina täysin käyttövalmiina. Mitään työkaluja ei tarvita.
- Pakkauksesta otettaessa tarvitsee vain nykäistä kokoontaitto kahvasta kunnes takajalat levittyvät. Paina käsituista alas kunnes kuulet rungon lukitusäänen.
- Kävelyteline taitetaan kasaan kuljetusta tai varastointia varten vetämällä toisella kädellä kokoontaittokahvasta ja pitelemällä toisella kädellä istuimen kahvasta. Breeze lukittu taitettuun asentoon kuten pieni kuva osoittaa.
- Noudata varovaisuutta sekä ergonomista nostotekniikkaa nostaessasi kävelytelinettä tai sijoittaessasi sitä auton peräkonttiin tai nostaessasi pois sieltä.

- Liiku kävelytelineelläsi suorana seisten ja pidä käsituista niin että pystyt helposti käyttämään molempia jarruja turvallisesti.
- Säilytä kävelytelinettä paikassa, jossa se on turvassa ilkvallalta.
- Varmistu aina että taittomekanismi lukittuu käyttöasentoon.
- Taittaessasi kävelytelinettä kasaan varo laittamasta sormiasi kääntyvän nivelmekanismiin väliin. Sormet voivat jäädä puristuksiin.
- Varmista että kaikki pyörät ovat tukevasti alustaa vasten ennen käyttöä.
- Varmista ennen käyttöönottoa, että jarrut toimivat normaalisti ja ovat oikein säädetyt.
- Varmista ennen käyttöä, että istuin on lukittuneena paikalleen
- Istuessasi asetu aina keskelle istuinlevyä ja varmista ennen käyt käyttöön-ottoa, että istuimen korkeus on säädetty niin, että jalkapohjat ylettyvät koko pituudeltaan alustalle.
- Lukitse jarrut seisontajarruasentoon aina ennen istuutumista.
- Älä yritä istua kokoontaitetun kävelytelineen päälle.
- Älä yritä nousta kävelytelineelle seisomaan tai käytä sitä askelmana.
- Kävelytelineen päällä ei saa koskaan kuljettaa henkilöitä tai tavaraa. Tavarakoriin saa sijoittaa maksimissaan 10 kg kuorman.
- Noudata varovaisuutta ja ergonomista nostotekniikkaa nostaessasi tai kantaessasi kävelytelinettä nettä.

KAHDEKSAN

KÄYTTÄMINEN

**Tavarakori (lisävaruste)**

Kätevä kahvallinen tavarakori kiinnittyy helposti istuimen etupuolelle. Tavarakoriin saa sijoittaa maksimissaan 10 kg painosta tavaraa.

**Esteiden ylittäminen**


Esteiden kuten kynnysten tai katukivetysten ylittäminen helpottuu, kun käytät kävelytelineen kippauspoljinta. Paina jalalla poljinta alaspäin samalla käsikahvoista taaksepäin keventäen, näin kävelytelineen keula kevenee ja isot etupyörät nousevat helpommin esteen yli.

Jarrut

Breeze kävelytelineen jarrut ovat erityisen varmatoimiset ja helpot käyttää. Jarruvaijeri on kuljetettu järkevästi kävelytelineen rungon sisällä, välttämällä rungosta ulkonevat vaijerilenkit kokonaan. Erikoispatentoitu ratkaisu tarjoaa parannettua käyttöturvallisuutta ja huoltovapautta.

Jarrutus tapahtuu yksinkertaisella kevyellä kämmenpuristuksella käsikahvaa vasten. Jarruttamiseen riittää heikentynekin puristusvoima ja jarrun herkkyyttä voidaan säätää käyttäjän mukaan.


Seisontajarrun saa aktivoitua painamalla jarrukahvoja alas kunnes ne lukittuvat. Seisontajarru vapautetaan vetämällä jarrukahvaa ylöspäin, kunnes se vapautuu.

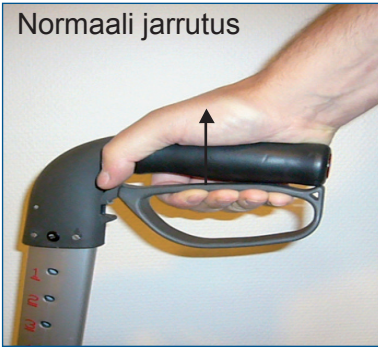

Jarrujen säätäminen

Ennen Breeze kävelytelineen käyttöönottoa jarrujen toiminta tulee tarkistaa. Käyttöönoton jälkeen kävelytelineen jarrut on tarkistettava säännöllisesti Breezen koko käyttöajan ajan. Määräaikaishuollon avulla kävelytelineen toimintakunto säilyy hyvänä ja normaalin kulumisen vaikutukset jarruissa ja pyöriässä saadaan säätötoimien ja kuluneiden osien vaihtamisen myötä eliminoitua.

Jarrun säätäminen on helppoa kätevän kuusiokoloruuvien avulla. Säätöruuvi sijaitsee takapyörän keskion kohdalla runkoputken sisällä (katso kuva). Säädä ruuvia niin, että jarrutalla on noin 3mm etäisyydellä renkaan pinnasta. Kääntämällä ruuvia myötäpäivään rako kasvaa ja kääntämällä vastapäivään rako pienenee.

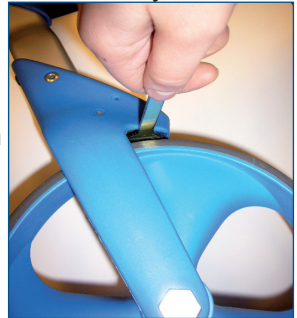

Malli	Breeze
Maksimikuormitus	125kg
Käsikahvojen korkeussäätö	77-95cm
Istuimen korkeussäätö	48-62cm
Koko (leveys x pituus)	60 x 72 cm
Taitettuna (lev x pit x kork)	60 x 28 x 96 cm
Kokonaispaino	7 kg
Materiaali	Alumiini, kuituvahvistettu muovi
Puhdistus	Yleispuhastusaine ja painepesuri

KYMMENEN

LISÄVARUSTEET

Breeze kävelyteline voidaan varustaa yksilöllisten tarpeidesi mukaan. Ottakaa yhteys jälleenmyyjään, jolta saatte lisätietoa varustevaihtoehdoista ja hinnoista. Breeze kävelytelineeseen saa seuraavia lisävarusteita:



Selkänöja – pehmustettu tuki, johon voi nojautua istumisen aikana.



Keppiteline – pidike, jossa kävelykeppiä voi säilyttää kävelytelineen käytön aikana.



Tarjotin – läpinäkyvää muovia, konepesun kestävä (max 3kg).



Tavaralaukku – laadukas muotoiltu laukku, jossa useita lokeroita ja vetoketjullisia taskuja.