

# Breeze

by ACCESS™



Forward  
Thinking  
Mobility

[www.Breeze-walker.com](http://www.Breeze-walker.com)

USER MANUAL

1. Inhalt	6. Transport und Montage
2. Einführung	7. Sicherheitshinweise
3. Teilebeschreibung	8. Handhabung
4. Pflege und Wartung	9. Technische Details
5. Individuelle Einstellungen	10. Sonderzubehör

Herzlichen Glückwunsch: Sie haben sich für den Breeze-Rollator entschieden. Der Breeze-Rollator wartet in einem neuartigen Design von Access Vital aus dem norwegischen Hamar auf. Er zeichnet sich durch eine leichte und handliche, moderne und elegante Form aus und wurde so konzipiert, dass er den Benutzer bei einer Vielzahl alltäglicher Abläufe, z. B. beim Laufen und Einkaufen, umfassend unterstützt.

Wir von Access sind der Ansicht, dass jedermann die Freiheit genießen sollte, die sich mit unbegrenztem Bewegungsspielraum verbindet – egal ob unter freiem Himmel, im öffentlichen Raum oder den eigenen vier Wänden. Unsere Produkte weisen eine einzigartige Funktionsvielfalt auf und bestechen gleichzeitig durch modernes Design, ohne als Gehhilfe stigmatisiert zu werden.

Der Breeze-Rollator eignet sich für den alltäglichen Indoor- wie Outdoor-Gebrauch. Zu seinen Merkmalen gehören leicht verstellbare Bedienelemente, drei einstellbare Sitzhöhen und besonders gute Tragbarkeit.

Alle Breeze-Rollatoren werden gemäß den höchsten Qualitätsstandards gefertigt und erhalten die CE-Kennzeichnung für medizinische Geräte. Der Breeze-Rollator ist ein robustes und optisch ansprechendes Produkt im skandinavischen Design und ein kosteneffektiver wie zuverlässiger Begleiter für besondere Mobilitätsanforderungen.

### 3.

## TEILEBESCHREIBUNG



### 4.

## PFLEGE UND WARTUNG

- Der Rollator ist nur für den Gebrauch als Gehhilfe konzipiert.
- Achten Sie darauf, den Rollator stets in sauberen Zustand zu halten. Der Rollator lässt sich mit einem Lappen oder Schwamm und mildem Reinigungsmittel abwischen oder mit einem Hochdruckreiniger oder Gartenschlauch reinigen.
- Überprüfen Sie bewegliche Teile (z. B. Räder und Höhenverstellhebel) regelmäßig.
- Achten Sie darauf, dass die Bremsen, die über die Bremshebel und Bowdenzüge betätigt werden, sachgerecht eingestellt sind (siehe Abschnitt HANDHABUNG).
- Alle Befestigungselemente (Schrauben, Muttern und Bolzen) sollten sicherheitshalber regelmäßig überprüft und ggf. nachgezogen werden.
- Lassen Sie Ihren Breeze-Rollator nur bei einem autorisierten Händler warten oder reparieren

## 5.

## INDIVIDUELLE EINSTELLUNGEN

**Einstellung der Griffhöhe**

Zum Einstellen der Höhe der Führungsgriffe ziehen Sie den Griffhöhenstellbügel heraus und schieben den Schaft auf die gewünschte Höhe. Lösen Sie den Stellbügel wieder, und drücken Sie die Führungsgriffe nach unten, damit sie einrasten.

Wiederholen Sie den Vorgang für den zweiten Griff.

**Einstellung der Sitzhöhe**

Zum Einstellen der Sitzhöhe drücken Sie beide Sitzverriegelungsklappen nach innen und nehmen den Sitz nach vorne aus den Führungsschienen heraus. Stellen Sie die gewünschte Sitzhöhe ein, und ziehen Sie den Sitz wieder nach hinten, bis die Verriegelungsklappen einrasten.

## 6.

## TRANSPORT UND MONTAGE



- Sie erhalten den Breeze-Rollator vollständig montiert und gebrauchsfertig. Sie brauchen keine Werkzeuge.
- Um den Breeze-Rollator zum einfachen Transport oder Verstauen zusammenzuklappen, ziehen Sie den Hebel der Klappvorrichtung nach oben und heben den Rollator an der Griffmulde der Sitzfläche an.  
Die vorderen Radstützen des Rollators lassen sich so wegklappen (siehe oberes linkes Foto).
- Zum Auseinanderklappen ziehen Sie den Hebel der Klappvorrichtung nach oben, bis die hinteren Räder wieder frei drehen. Drücken Sie den Rollator an den Griffen nach unten, bis er hörbar einrastet.
- Verstauen Sie den Rollator mit angemessener Vorsicht im Kofferraum.

## 7.

## SICHERHEITSHINWEISE

- Achten Sie zu Ihrer Gesundheit und zu Ihrem Wohlbefinden stets auf eine gute Haltung und führen Sie den Rollator so, dass Sie die Bremsen problemlos bedienen können.
- Bewahren Sie den Rollator an einem sicheren Ort auf.
- Klappen Sie den Rollator vor dem Gebrauch vollständig auf, bis er hörbar einrastet.
- **ACHTUNG!** Gefahr des Einklemmens: Greifen Sie beim Ein- oder Ausklappen nicht in das Scharnier des Breeze-Rollators.
- Achten Sie vor dem Gebrauch darauf, dass die Räder fest sind und auf den Boden aufsetzen.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch die ordnungsgemäße Einstellung der Bremsen und deren Funktionsfähigkeit.
- Überprüfen Sie, ob die Sitzfläche eingerastet ist, bevor Sie sie belasten.
- Sitzen Sie immer mittig auf der Ihrer Körpergröße entsprechend eingestellten Sitzfläche, so dass Sie mit den Füßen den Boden berühren.
- Stellen Sie in jedem Fall die Feststellbremsen fest, bevor Sie sich auf den Rollator setzen.
- Setzen Sie sich in keinem Fall auf den Rollator, wenn er zum Verstauen zusammengeklappt ist.
- Stellen Sie sich keinesfalls auf den Rollator, und verwenden Sie ihn nicht als Trittleiter.
- Transportieren Sie keinesfalls Personen auf der Sitzfläche des Rollators.
- Heben und tragen Sie den Rollator stets mit angemessener Sorgfalt.

## 8.

## HANDHABUNG

**Korb**

Der handliche Einkaufskorb ist vor dem Sitz des Breeze-Rollators angebracht. Er hat eine Traglast von max. 10 kg.


**Hindernisse**

Der Rollator ist mit großen schwenkbaren Vorderrädern sowie einem Trittsteg ausgestattet, um größere Hindernisse (z. B. Bordsteinkanten) mit Leichtigkeit zu überwinden. Treten Sie mit dem Fuß auf den Trittsteg, und ziehen Sie die Führungsgriffe nach hinten. So heben sich die Vorderräder wie von selbst an, und Sie können das Hindernis spielend meistern.



## Bremsen


Die Bremsen der Gehhilfe sind eine eigens konstruierte und wesentliche Funktion des Breeze-Rollators. Die Bowdenzüge sind in das Gestell integriert, und das patentierte System ist zugleich sicherer und erfordert weniger Wartung als andere Modelle. Zum Bremsen ziehen Sie einfach die Bremshebel in Richtung der Führungsriffe. Dazu ist nur ein leichter Zug erforderlich, und die Bremsen lassen sich für unterschiedliche Widerstände einstellen. Zum Feststellen der Bremsen (d. h. um die Feststellbremse zu aktivieren) drücken Sie die Bremshebel bis in die verriegelte Position. Um die Bremsen wieder zu entriegeln, ziehen Sie die Bremshebel nach oben, bis sie wieder in die Ausgangsposition zurückspringen.

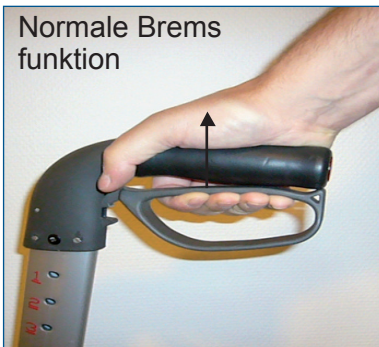

## Wartung der Bremsen

Vor dem Gebrauch des Breeze-Rollators müssen Sie die richtige Einstellung der Bremsen überprüfen. Die Bremsfunktion sollte regelmäßig kontrolliert werden, um die durch normalen Gebrauch verursachte Abnutzung der Bremsen und Räder und dadurch veränderte Bremseinstellung nachzujustieren.

An der hinteren Strebe jeweils direkt über dem hinteren Rad befindet sich eine leicht einstellbare Stellschraube (Sechskantprofil). (Bild rechts) Justieren Sie die Schraube so, dass der Bremsarm einen Abstand von ungef. 3 mm zum Rad aufweist. Durch ein Festziehen der Schraube (rechtsherum) vergrößert sich der Abstand, durch Lösen der Schraube (linksherum) verringert sich der Abstand zum Rad.

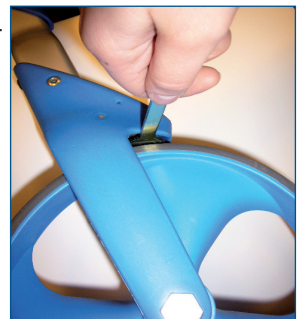

## 9.

## TECHNISCHE DATEN

Typ:	Breeze
Max. Körpergewicht:	125 kg
Handgriffhöhe	77-95cm
Sitzhöhe	48-62cm
Abmaße in cm (w x l):	60 x 72cm
Abmaße (eingeklappt):	60 x 27 x 96
Gewicht:	<7 kg
Material:	Aluminium und faserverstärkter Kunststoff
Reinigung:	Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger

## 10.

## SONDERZUBEHÖR

Ihr Breeze-Rollator lässt sich ganz nach Ihren Bedürfnissen mit weiterem Zubehör ausrüsten. Wenden Sie sich an den Händler und erfragen Sie dort Preise und Vorrätigkeit:



•Rückenlehne – gepolsterte



•Krücken-/Stockhalter – zur Mitnahme von Krücken oder Gehstöcken



•Serviertablett – geschirrspülergeeignet, für Getränke und Mahlzeiten (bis 3 kg)



•Deluxe Case Logic Tasche – für Ihre persönlichen Dinge